

Браслет от укачивания детский Travel Dream



Київ, Україна

Если вы склонны к укачиванию в транспорте:

Наденьте браслеты ТрэвелДрим® непосредственно перед началом путешествия до появления симптомов укачивания и тошноты.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется носить браслеты ТрэвелДрим® на обеих руках.

Не снимайте браслеты во время поездки. Это может вызвать появление укачивания.

На протяжении поездки следите за тем, чтобы браслеты ТрэвелДрим® были правильно зафиксированы на запястьях.

Пластиковый шарик браслета должен воздействовать непосредственно на акупунктурную точку Р6 на запястье. Перед применением браслетов внимательно прочитайте инструкцию.

Сконцентрируйте взгляд на линии горизонта или на удаленном неподвижном объекте.

Не читайте во время движения.

Держите голову неподвижно, откинувшись на спинку сиденья.

Не курите и не садитесь возле курящих.

Избегайте пряной, жирной пищи и алкоголя. Не пере едайте.

При сильной тошноте нажмите на пластиковый шарик браслета ТрэвелДрим® пальцем, что обеспечит быстрое подавление неприятных симптомов.

Планируя поездку, обращайтесь внимание на общие рекомендации для предотвращения укачивания и тошноты в транспорте.

Бронируйте места, где укачивание ощущается меньше всего:

На пароходе: рекомендуется бронировать каюты в передней или средней части корабля, а также на верхней палубе.

На самолете: попросите билеты у переднего края крыла. Во время полета направьте в лицо воздушную струю из трубки вентиляционной системы.

В поезде: занимайте место у окна в передней части вагона. Сядьте лицом по ходу движения.

В автомобиле: сядьте на переднее сиденье рядом с водителем.

Price: **220 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Кулик Виктория

099-089-80-10

ул.Ващенко 5