

Сенсор Freestyle Libre для круглосуточного измерения сахара в крови Европа



Київ, Україна

Этот прибор FreeStyle Libre Европейского и Канадского производства, размером в 5-копеечную монету предназначен для возможности непрерывного измерения глюкозы в любой момент времени в течении 14 суток. В любое время вы можете увидеть уровень сахара в крови при помощи ридера (считывающего устройства) либо специального программного обеспечения на свой смартфон. При помощи сенсора и считывающего устройства в зависимости от того, какой вы выберете (ридер или ваш смартфон) вы сможете постоянно видеть изменения сахара в крови и исходя из увиденного - делать выводы по поводу правильности подбора доз инсулина и правильности вашего питания. Система FreeStyle Libre особенно удобна для контроля сахара у детей, чтобы не колоть постоянно пальчики для измерения сахара Ланцетом. Также удобно измерять сахар у деток, когда они спят, чтобы не будить.

ВИДЕО ОБЗОР ПО УСТАНОВКЕ ПО ССЫЛКАМ

<https://youtu.be/qjCWXePWxJY>

<https://youtu.be/5M2ELE67IsM>

<https://youtu.be/g5-xSlrirHY>

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Малый размер сенсора комфортен при установке под одежду и не мешает при ежедневном использовании.

Легкость применения и безболезненность использования. Сверхтонкая игла находится под кожей, головка которой достигает интерстициальной (тканевой) жидкости.

Точные показания датчиков. Калибровка сенсора не требуется, и система не взаимодействует с препаратами, содержащими парацетамол.

Водонепроницаемость. При использовании сенсора в течении 14 дней его можно носить во время плавания, принятия душа или занятиями спорта.

Используя систему Фристайл Либре вы забываете о ежедневном проколе пальцев ланцетами или скарификаторами по несколько раз в день.

Данная система отлично помогает подобрать нужную дозу инсулина для больного диабетом, так как позволяет постоянно мониторить уровень сахара в крови на кол-во съеденных хлебных единиц (ХЕ) и введенного короткого или ультракороткого инсулина под них, позволяя видеть его график, и вносить соответствующие коррективы.

- Выберите область кожи на задней части плеча, которая обычно остается плоской во время обычной повседневной деятельности (без сгибания или разгибания). Выберите место, которое находится на расстоянии не менее 2, 5 см от места инъекции инсулина.

- меняйте руку при использовании нового сенсора

2. Подготовка вашей кожи

Чтобы улучшить «стыковку» сенсора с телом, помойте кожу с мылом и водой и высушите ее. После этого обработайте спиртовой салфеткой место куда будете ставить сенсор и дайте ему высохнуть на воздухе (не обдувайте его) перед продолжением.

3. Применение датчика

- Откройте сенсорный блок, полностью отделив крышку. Открутите колпачок от аппликатора датчика и снимите его.

- Найдите темную метку на аппликаторе датчика, и затем такую же метку на сенсорной упаковке, и выровняйте их по одному уровню. На устойчивой поверхности сильно нажмите на аппликатор сенсора, до того момента пока он не остановится.

- Поместите аппликатор датчика на нужный участок кожи и плотно прижмите до тех пор, пока сенсор не будет установлен.

ДОСТАВКА:

По всей Украине (за счёт покупателя по тарифам перевозчика).

Пересылка такими компаниями - Новая почта, Укрпочта

ОПЛАТА:

-- наложенным платежом (расчет на почте при получении заказа)

или

--100% предоплата на карту Приват банка. Комиссию банка в размере 1% от стоимости за обналичивание ваших денег с моей карты оплачиваете Вы.

Price: **2 150 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Величко Владимир

0982191863